

OPTIVIZOR OOGBESCHERMING - MATEN -





OPNEMEN VAN DE MAAT VOOR DE OPTIVIZOR

De maat van de Optivizor wordt bepaald aan de hand van een tabel voor de grootte van de kop van de hond en een tabel voor het gewicht van de hond.

Het kan zijn dat U volgens beide tabellen twee verschillende maten nodig hebt.

Dit komt omdat honden uiteraard in allerlei soorten en maten voorkomen.

Als dit het geval is, kies dan de kleiner maat.

STAP 1 - BEPAAL OF UW HOND EEN KORTE SNUIT, NORMALE SNUIT OF EEN LANGE SNUIT HEEFT

STAP 2 - BEPAAL HET GEWICHT VAN DE HOND

STAP 3 - BEPAAL DE AFMETING VAN DE KOP

STAP 4 - BEPAAL VOLGENS BEIDE TABELLEN DE MAAT VAN DE OPTIVIZOR

STAP 1 - BEPAAL OF UW HOND EEN KORTE SNUIT, NORMALE SNUIT OF EEN LANGE SNUIT HEEFT

Dit is slechts een richtlijn vanwege de mogelijkheid van variaties in de schedelvorm binnen het ras zelf.

Optivizor normaal snuit model

Affenpinscher	German/Belgian Shepherd	Miniature Pinscher
Airedale Terrier	German Short-/Long/	Munsterlander
Akita Inu	Wiredhaired	Newfoundland
American Collie	Pointer	Owtscharka
Appenzell Mountain Dog	Great Dane	Pointer
Australian Shepherd	German Pinscher	Podenco
Basset Hound	English Setter	Poodle
Bearded Collie	Foxhound	Komondor
Beagle	Fox Terrier	Rehpinscher
Bernese Mountain Dog	Golden Retriever	Rhodesian Ridgeback
St. Bernhard	Groenendael / Tervueren	Rottweiler
Bloodhound	German Hovawart	Samoyede
Old English Sheepdog	Husky (all)	Schnauzer (all breeds)
Border Collie	Karabash	Setters
Briard / Berger de Brie	Kuvasz	Shetland Sheepdog
Bullterrier	Labrador Retriever	Spaniel (all except King Charles,
Chihuahua	Lhasa Apso	English Toy and Tibetan)
Chow Chow	Leonberger	Terrier (all, except Boston,
Cocker Spaniel	Alaskan Malamute	Yorkshire)
Cumberland Sheepdog	Malteser	Vizsla
Dachshound	Mastiff	Weimaraner
Dalmatian	Mastino Napoletano	Welsh Corgi

Optivizor korte snuit model

Bolognese	Cavapoo (Mini Doodle)	Pug
Dogue de Bordeaux	English Bulldog	Pekingese
Boston Terrier	French Bulldog	Shar-Pei
Boxer	Havanese	Shih Tzu
Bulldog	Japanese Chin	Tibetan Spaniel
Bullmastiff	King Charles Spaniel	Yorkshire Terrier

Optivizor lange snuit model

Afghan Hound	Spanish Galgo
Borzoi	Greyhound
Rough Collie	Sloughi
Doberman Pinscher	Whippet

STAP 2 - BEPAAL HET GEWICHT VAN DE HOND


kg	Maat
< 2*	Tiny
< 2*	Mini Mini
< 2*	Mini
2 - 6	Toy
5 -12	Small
10 - 25	Small / Medium
23 - 35	Medium
33 - 45	Large
46+	Xlarge

STAP 3 - BEPAAL DE AFMETING VAN DE KOP

Normal en Lange Snuit Honden

Meet het middelpunt vanaf de achterkant van de oren, dus vanaf de nek zijde. Meet de kortste afstand tussen het middelpunt en de tip van de neus. Volg dus niet de contouren van de kop.

Vinden van het middelpunt tussen de oren. Meten van het middelpunt tot de tip van de neus.

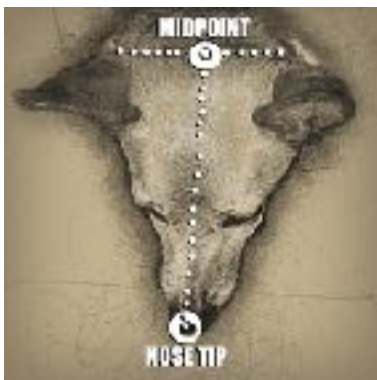

Normal Snuit

Maat	kop lengte, cm
Mini	9.5 - 11
Toy	12 - 15
Small	16 - 18
Small / Medium	19 - 21
Medium	22 - 24
Large	25 - 27
Xlarge	28+

Lange Snuit

Maat	kop lengte, cm
Toy	12 - 15
Small	15 - 17
Small / Medium	17 - 20
Medium	20 - 23

Korte Snuit Honden

Meet de omtrek volgens de witte lijn in de afbeelding over de oren en rondom de kaak, dus niet de nek. Houdt het meetlint relatief strak tijdens het meten; bij gebruik van de Optivizor komen de oren weer vrij te liggen



Diameter van kop, cm	Maat
28 - 30	Tiny
30 - 32	Mini Mini
32 - 34	Mini
35 - 38	Toy
39 - 43	Small
44 - 48	Small / Medium
49 - 55	Medium
56 - 60	Large
60>	Xlarge

STAP 4 - BEPAAL VOLGENS BEIDE TABELLEN DE MAAT VAN DE OPTIVIZOR

De maat van de Optivizor wordt bepaald aan de hand van een tabel voor de grootte van de kop van de hond en een tabel voor het gewicht van de hond. Het kan zijn dat U volgens beide tabellen twee verschillende maten nodig hebt. Dit komt omdat honden uiteraard in allerlei soorten en maten voorkomen. Als dit het geval is, kies dan de kleiner maat.

BELANGRIJK

De Korte Snuit Optivizor past alleen wanneer de hoofd "niet te diep" is, dat wil zeggen de afstand tussen het voorhoofd en de nek (zie de foto van de lange pijl) niet te lang. Want als dit het geval is, dan zit de Optivizor te dicht op de ogen en raakt deze wellicht. De kleine rode pijlen tonen aan dat de afstand voor deze hond correct is. De hoofdsteen zit op het midden van het voorhoofd, zoals het hoort.



Houdt er ook rekening mee dat in het geval van korte snuit Optivizor dat er een 50-50 kans is dat de Optivizor niet goed past, omdat de schedel van korte snuit honden soms te lang is en het masker dan te dicht voor de ogen zit. In dit geval kan de Optivizor voor normale snuit als alternatief worden gebruikt.

Korte Snuit Optivizor is in veel gevallen ook geschikt voor honden met een normale snuit vooral als deze veel vacht in het gezicht hebben. De korte snuit Optivizor geeft in dat geval meer ruimte zodat de vacht niet in de ogen gedrukt wordt.

